

دستور العمل استفاده از مواد گندزدا و ضد عفونی کننده

ردیف	نام محصول	کاربرد	مصرفی / وقت	زمان اثر گذاری	نحوه آماده سازی	روش مصرف	نیاز به آبکشی بعد از استفاده ... از محلول ...	زمان اثر بخشی
1	سایاسپت	مخصوص گندزدایی سطوح و کف-نرده ها-دستگیره درها- بدنه و کف آسانسور...	1درصد	نیم ساعت	ده سی سی در 990 سی سی آب	اسپری و اسفنج کشی	نمی باشد	روز 14
			2درصد	پنج دقیقه	بیست سی سی در 980 سی سی آب			
2	سایاسپت	مخصوص گندزدایی و ضد عفونی ابزار آلات پزشکی (ست های اتاق عمل - پانسمان- زایشگاه) و دندان پزشکی	1درصد	یک ساعت	ده سی سی در 990 سی سی آب	اسپری و غوطه وری	می باشد	روز 14
			2درصد	یک ربع	بیست سی سی در 980 سی سی آب			
3	سپتی سیدین پلاس	مخصوص دست و پوست بدن	-	ثانیه 30	محلول آماده مصرف	2تا3 سی سی از محلول روی دست عاری از چربی ویا آلودگی های دیگر اسکراب شود	نمی باشد	-
4	سپتی ژل							
5	سپتی سیدین	مخصوص دست جراح و تکنسین اتاق عمل قبل از جراحی	-	دقیقه 1	محلول آماده مصرف	ابتدا دستها را با آب خیس نموده ، سپس 5 سی سی از محلول روی دست عاری از چربی ویا آلودگی های دیگر اسکراب شود	می باشد	-
6	سپتی پرپ	ضد عفونی کننده محل تزریق و جراحی های کوچک	-	سریعا"	محلول آماده مصرف	اسپری به پوست عاری از چربی ویا آلودگی های دیگر	نمی باشد	-
7	پرسیدین 1%	مخصوص گندزدایی و ضد عفونی منسوجات	-	-	پنج سی سی به ازای هر کیلو گرم لباس به ، آب اضافه شود- توجه: از استفاده همزمان با آب ژاول پرهیز شود		می باشد	-
8	ویویساید 01	مخصوص ضد عفونی و استریلیزاسیون سطح بالای ابزار پزشکی (ابزار- آندوسکوپ- ساکشن- آمیوبگ- تیغه لارنگوسکوپ- پروپ سونوگرافی و سونیکیت- لاپاروسکوپ)	-	دقیقه 15-20	محلول آماده مصرف	غوطه وری آندوسکوپ و لاپراسکوپ در محلول بمدت 15-20 دقیقه بعد از این مدت 1- بجز لنز، آندوسکوپ با آب شهری شستشو شود 2- لاپراسکوپ با آب مقطر شستشو شود	می باشد	روز 28
9	آب ژاول (وایتکس)	مخصوص گندزدایی سطوح آشپزخانه ، آبدارخانه ، در و دیوار و میز پرسنل- نرده های کمکی ، پیشخوان استیشن	1درصد	دقیقه 15-30	ده سی سی در 990 سی سی آب	اسپری و اسفنج کشی	سطوح آشپزخانه و آبدارخانه نیاز به شستشوی باشد	روز 1
		مخصوص گندزدایی کف راهرو و اتاق بیماران	2درصد	دقیقه 15-30	بیست سی سی در 980 سی سی آب	ابتدا شستشو با آب تمیز و در نهایت زدن تی (کنفی) آغشته به آب ژاول	نمی باشد	
		مخصوص گندزدایی کف توالت و شستشوی لگن بیماران - لکه بری پتو و البسه بیماران	5درصد	دقیقه 15-30	پنجاه سی سی در 950 سی سی آب	ابتدا شستشو با آب و در نهایت زدن تی (لاستیکی) با آب ژاول	می باشد	
		مخصوص گندزدایی و ضد عفونی لکه خون	10درصد	دقیقه 10	صد سی سی در 900 سی سی آب	ابتدا تمیز نمودن خون ، سپس انداختن دستمال آغشته به آب ژاول 10 درصد روی آن ، سپس تمیز نمودن کلی منطقه با آب ژاول 2 درصد	نمی باشد	

